



はなまる

イチオシ 商品情報



駐車ブレーキ操作が

必要ない♪



歩行器 ジスタ

介護保険レンタル料金

1割負担 500円

2割負担 1000円

3割負担 1500円

ワンタッチ切り替え 2WAY キャスター



ボタンを押す、レバーを戻すだけの簡単な操作で、キャスター回転角度を120°または360°に変更できます。

カゴ載せ機能



買い物カゴ
固定フック付き

コンパクトな製品幅でも買い物カゴが載せられるため、買い物カートに持ち替えることなく、歩行車のまま買い物ができます。

荷物用フック



座面下の袋に加えて、軽量の荷物をフックに掛けることができます。

ワンタッチ ステッキホルダー



クリップ式なので、片手でかんたんに杖の着脱ができます。

グリップから手を離すだけで駐車ブレーキがかかる、 新たなブレーキシステム

①グリップから手を離す



駐車ブレーキ

②グリップを握る



駐車ブレーキ解除

③ブレーキレバーを握る



制動ブレーキ

グリップから手を離すだけで駐車ブレーキがかかります(①)。グリップを握ると駐車ブレーキが解除され歩行可能となります(②)。その状態でブレーキレバーを握ると制動ブレーキが作動します(③)。



座面を出しているときは、グリップやブレーキレバーに触れたり握ったりしても駐車ブレーキが解除されない構造のため安心です。



はなまるレンタルサービス

2772404477

* 福祉用具貸与・販売
* 住宅改修

〒573-1162
大阪府枚方市田口1丁目19番3号

TEL : 072-805-0870
FAX : 072-805-0875

ホームページ → <https://time-get.com>
Twitter → @hanamarurental



こんなヒヤリハットの経験、ありませんか？

幸和製作所は歩行車の**ヒヤリハットゼロ**をめざします

Case 01

人的要因のヒヤリハット

駐車ブレーキをかけ忘れて座ろうと(立ち上がろうと)したため、車体が動いて転倒しそうになったことはありませんか？



＼ジスタなら！／

駐車ブレーキ操作が不要

グリップから手を離すだけで駐車ブレーキがかかるので、かけ忘れることがなく安心です。



Case 02

歩行車の構造が要因のヒヤリハット

立ち上がる時ブレーキレバーに引っかかり、意図せず駐車ブレーキが解除されてしまい、車体が動いて転倒しそうになったことはありませんか？



＼ジスタなら！／

座面を出した状態では駐車ブレーキは解除されません

座面を出しているときは、グリップやブレーキレバーに触れたり握っても駐車ブレーキが解除されない構造のため安心です。



Case 03

生活環境が要因のヒヤリハット

毛髪やゴミなどがタイヤに絡まり動きが悪くなり、バランスを崩したことはありませんか？



＼ジスタなら！／

その場でかんたんにお手入れが可能です

工具が不要で、かんたんにタイヤの着脱ができます。その場ですぐにお手入れができるため安心してご使用いただけます。



日常生活をラクにする
コンパクトサイズ



多くの人にフィットする押し手高さ



抜け落ちない
高さ調節ネジ



歩行車の中でも最小クラスで、狭い通路でも扱いやすいです。

押し手高さが幅広く調節できるので、背の高い方から低い方まで使用できます。高さ調節ネジは抜け落ちない構造になっているため、紛失を防止します。



ネイビー



折り畳み時



品番 WAW33

組立て寸法 幅480×奥行600×高さ715～925mm

折畳み寸法 幅480×奥行370×高さ780mm

押し手高さ 700～910mm 8ポジション

座面寸法 幅295×奥行230mm

座面高さ 465mm

袋寸法 幅290×奥行195×高さ180mm

重量 5.9kg

材質 本体：アルミニウム合金、座面・袋：ポリエステル

J A N 4938765021199

T A I S 00030-000241

※各寸法、重量は参考値です。

ジスタ / Zista