



はなまる

イチオシ

商品情報



PARAMOUNT BED

cococia Y Ū K I R I S E

結起Rise

エアマットレス ここちあ ゆうきライズ



全自動運転と多才なサポートセルで、
背あげイノベーション。



パラマウントベッド株式会社

WELL-BEING for all beings

はなまるレンタルサービス

*福祉用具貸与・販売 *住宅改修

***本社**

大阪府枚方市田口1-19-3
072-805-0870


***宇治支店**

京都府宇治市伊勢田町中山27-3
0774-46-9034

***寝屋川支店**

大阪府寝屋川市仁和寺本町4-11-13
072-813-0871



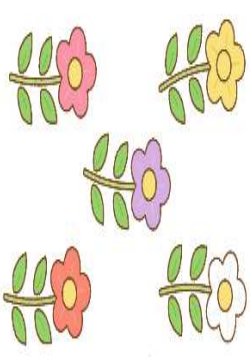


介護保険
1,000
単位/月額



背あけ時の
膝下を
サポート

ヘッドアップセル

頭をあげて膝下をサポート

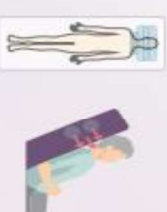


- 頭をあげて膝くまを引いた「頸部前屈姿勢」にすることで、食料の通路を広げて膝下をサポートします。
- ヘッドアップセルのかたさは、1-fittingの数値に合わせて3段階で自動調整します。手動でも微調整が可能です。なのでご利用者様に合った角度にすることができます。



背あけ時の
ずれ・圧迫感
軽減

てん部サポートセル


足側へのずれ落ち軽減と
体圧低減

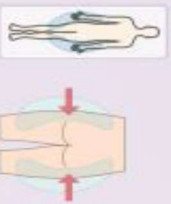

- 背あけ時に大腿部後面を支えることで、足側へのすり落ちを軽減します。
- 骨盤を左右から支え、身体の内らつきを抑えることで、ベッドからの転落防止をサポートします。
- 骨盤を立体的に包み込み、接触面積を拡大することで、背あけ時のてん部の体圧を軽減します。

背抜きセル


左右交互に膨らませて
背部のずれ・圧迫感を軽減

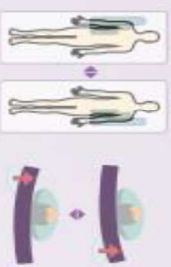

- 背あけ時に左右交互に膨張・収縮を繰り返し行うことで、背部に溜まったずれ・圧迫感を軽減します。
- このとき、膨張している背抜きセルと反対側のセルも少し膨らませることで、体幹の安定を図り、身体がエアマツレス状態にすくいやすいようにします。

背抜きセル

左右同時に膨らませて
背あげ姿勢を保持

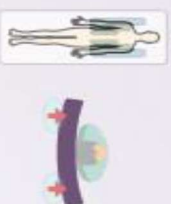

- 背あけ時に両側を左右から支え、ふらつきを抑えることで、ベッドからの転落防止をサポートします。

蒸れ軽減

ワイロイカバー

透湿+吸放湿



- 水蒸気を外へ逃す透湿性に加え、水蒸気を吸収&放出する吸放湿性も備えています。消拭消毒対応。

通気カバー

通気+撥水



- 水分をばじく撥水加工を施し、従来の通気カバーよりさらに使いやすく、取り外して洗浄可能です。